

氣道連接器

衛部醫器製壹字第009031號



貝斯美德 **氣道連接器** 是為氣切患者恢復說話功能的發聲閥，適用於意識清楚的氣切患者作發聲訓練或協助病患氣切管脫離。透過經上呼吸道吐氣，能促進排除分泌物、增加吞嚥、味覺及嗅覺功能。



產品原理

氣道連接器為一單向閥，接上患者氣切管接口後，當病患吸氣時，氣流可經氣切導管流入患者肺部，吐氣時，瓣膜會關閉使氣流經上呼吸道離開流入大氣，此時即可訓練發聲。

產品特點


- 閥門阻力小，減輕呼吸做功
- 能接於標準15mm的氣切管
- 無氣漏的設計
- 易於保養清洗

產品規格

- 壓力：耐壓 >200 cmH₂O
- 阻力：流量50LPM時，阻抗 <3 cmH₂O
- 氣密：壓力100cmH₂O時：
 壓力洩漏 <1cmH₂O/sec
 流量洩漏 <5ml/min


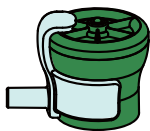

產品清潔

使用後取下氣道連接器以蒸餾水或溫和肥皂沖洗乾淨，並放置於通風處使其乾燥，即可放入收納盒中存放。注意不要使用高壓、煮沸水、漂白水、酒精、刷子清洗瓣膜，以免變形。

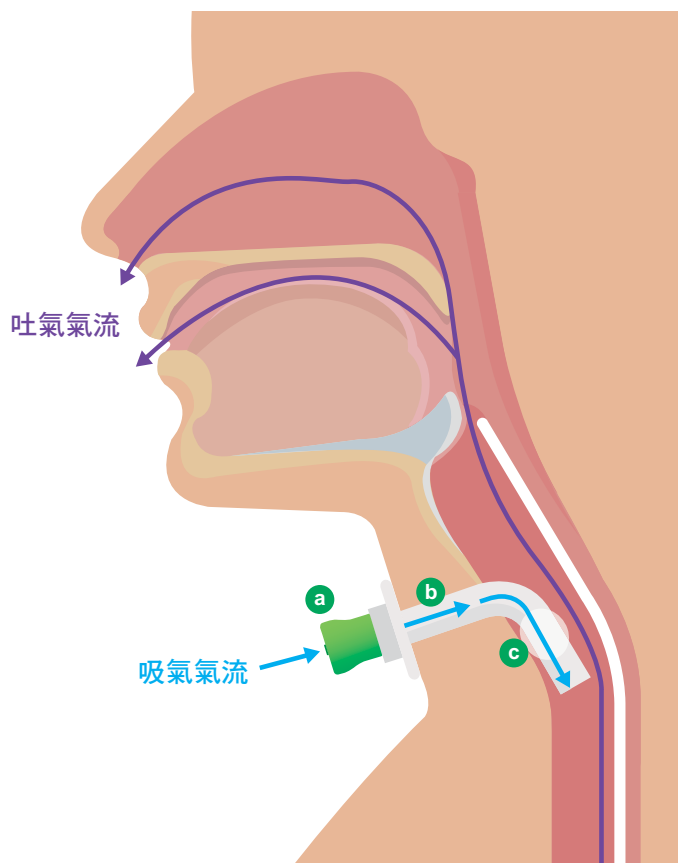

- a 氣道連接器
- b 氣切導管
- c 氣囊消氣

訂購資訊

產品型號	SV-89480	SV-89470	SV-89460
產品描述	 氣道連接器 氣切專用 ID: 15mm	 氣道連接器 氣切專用含氧氣接頭 ID: 15mm	 氣道連接器 呼吸器專用 ID: 15mm, OD: 22mm
產品包裝	20入/箱 (以上三款皆附攜帶盒)		



貝斯美德股份有限公司

24889新北市五股區五工三路106巷2號

電話：02-2290-3959

傳真：02-2299-9076

信箱：info@besmed.com

網站：www.besmed.com

業務專線

北區：0907-903-523

中區：0907-903-793

南區：0939-866-056



2021-09 Rev.1